

"Welche Eigenschaften machen Tegaderm Schaumverbände einzigartig?"

Tegaderm Foam und Tegaderm Foam Adhesive überzeugen durch effizientes und flexibles Exsudatmanagement, leichtes Handling und eignen sich hervorragend zum Einsatz an schwer zugänglichen Körperstellen.




"Zeit für harte Fakten: Was leisten Tegaderm Schaumverbände im Einzelnen?"

Tegaderm Schaumverbände bieten eine Reihe echter Vorteile zur schnellen, erfolgreichen Wundheilung:

- Hervorragendes Exsudatmanagement bei wenig bis stark exsudierenden Wunden.
- Hoch absorbierend und atmungsaktiv zur Förderung der Wundheilung.
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit zur schnellen Abdampfung überschüssiger Feuchtigkeit.
- 4 Sichere Barriere vor Flüssigkeiten und Keimen. Zuverlässiger Schutz vor Bakterien sowie Viren.*
- Formstabil und druckbeständig auch unter Kompression.



^{*} In-vitro-Tests belegen, dass die transparente Folie eine Barriere für Viren mit einem Durchmesser von 27nm oder größer bildet, solange der Verband intakt bleibt und keine Flüssigkeit durchsickert.

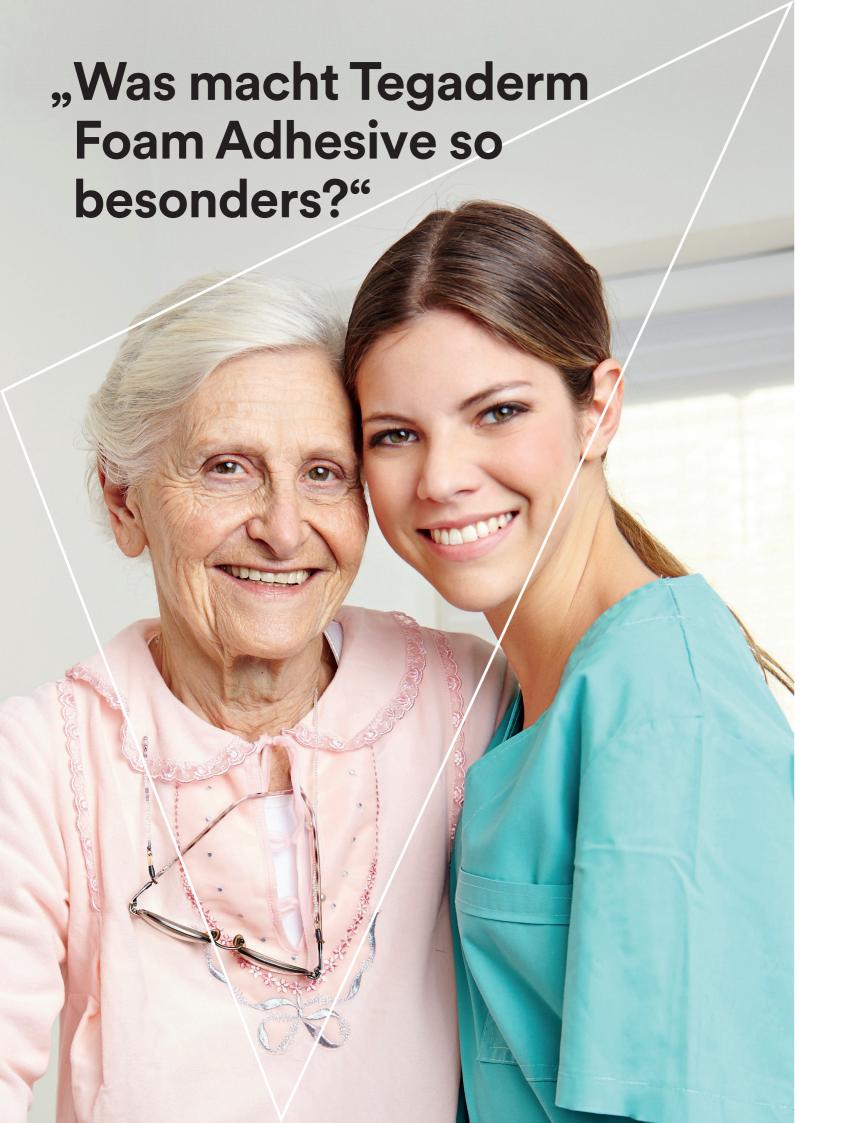

- Tegaderm Foam Adhesive bietet mit seinem extradünnen, transparenten Kleberand sicheren und zuverlässigen Halt.
- Tegaderm Foam Adhesive sitzt auch an schwierigen Stellen perfekt und vermindert – auch bei starken Scherkräften – das frühzeitige Ablösen oder Aufrollen. Für mehr Patientenkomfort und längere Tragedauer.
- 3 Das Speichenapplikationssystem mit klebstofffreien Haltelaschen vereinfacht die Applikation, auch mit nur einer Hand, z. B. Ferse.





"Was ist anden Tegaderm Schaum-verbänden so innovativ?"


Tegaderm Foam bietet effizientes und flexibles Exsudatmanagement dank neuartiger 4-Lagen-Technologie aus:

- atmungsaktivem Film
- feuchtigkeitskontrollierender Schicht
- Superabsorberkissen
- feinporigem Polyurethanschaum

Bei Tegaderm Foam Adhesive ist der transparente Film zusätzlich mit hydrophilem Polyacrylatklebstoff beschichtet und bietet damit sicheren Halt ohne Fixierhilfen.

Für wenig bis stark exsudierende,


oberflächliche bis tiefe Wunden, z.B.:

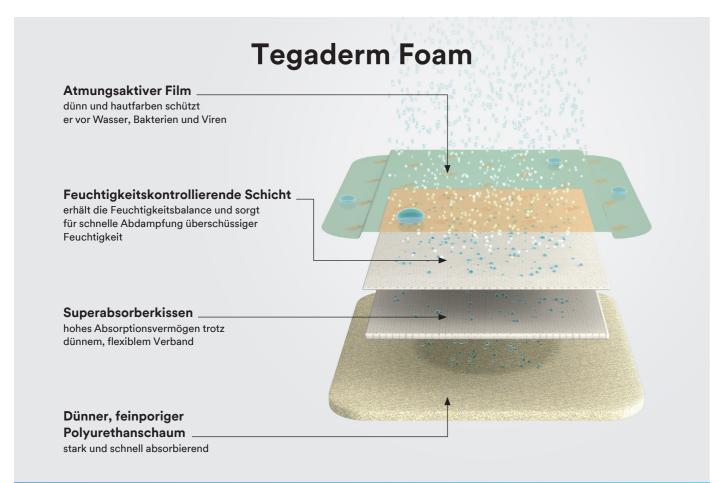

Indikationen

Für wenig bis stark exsudierende, oberflächliche bis tiefe Wunden, z.B.:

- · Dekubitalulcera
- Venöse Ulcera
- Schürfwunden
- Oberflächliche Verbrennungen
- Spendehautentnahmestellen
- · Arterielle Ulcera
- Neuropathische Ulcera
- · Chirurgische Wunden und Hautrisse

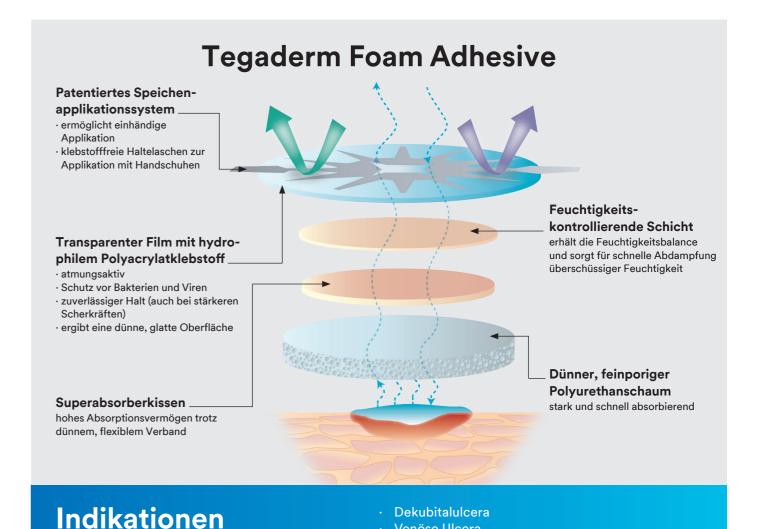

· Venöse Ulcera

Schürfwunden

· Arterielle Ulcera

· Neuropathische Ulcera

Platzwunden

· Oberflächliche Verbrennungen

Spendehautentnahmestellen



"Welche Produktvarianten sind für welche Körperregionen empfehlenswert?"



10.0 × 11.0 cm









19,0 × 22,2 cm

z. B. die ovalen Formen von Tegaderm Foam Adhesive passen sich optimal der Anatomie des Körpers an.



14.0 × 14.0 cm

Ellenbogen

z. B. der runde Verband von Tegaderm Foam Adhesive - mit einer Hand applizierbar. Perfekter Sitz an prominenten Stellen.



90613 14,3 × 15,6 cm

19,0 × 22,2 cm

Hüfte

Zur Wundabdeckung nach Hüft-OP z. B. Tegaderm Foam Adhesive in ovaler Form.



90613 14,3 × 15,6 cm

Versorgung von Dekubitalulcera z. B. mit Tegaderm Foam Adhesive in ovaler Form.



14.0 × 14.0 cm

z. B. der runde Verband von Tegaderm Foam Adhesive - mit einer Hand applizierbar. Perfekter Sitz an prominenten Stellen.





 $10.0 \times 11.0 \text{ cm}$



14.0 × 14.0 cm

Fuß und Fußgelenk _

An der Ferse Einhandapplikation mit rundem Tegaderm Foam Adhesive. Bei Wunden an Vorfuß und Knöchel oder als Polsterung zur Dekubitusprophylaxe z. B. kleine ovale Formen des Tegaderm Foam Adhesive.



6,9 × 7,6 cm









8,8 × 8,8 cm



90611

10,0 × 11,0 cm

TIPP: Ideal für

Nase und Kinn

90604 8,8 × 8,8 cm

Bauch

Kathetern und Drainagen.

Kopf

Bei Druckulcera: z. B. die kleineren Größen

von Tegaderm Foam/Foam Adhesive.

Hals/Nacken Bei Tracheostoma, PEG, suprapubischen

Die Auswahl an ovalen, quadratischen und länglichen Schäumen ermöglicht die Versorgung verschiedenster Wundgrößen und -formen.

Steißbein z. B. ovale und runde Tegaderm Foam Adhesive Verbände bei gefährdeten

Hautarealen und Dekubitalulcera.

z. B. Tegaderm Foam Adhesive in kleiner ovaler Größe – optimal für schwierig zu

Schienbein/Wade

Finger

Bei Ulcerationen oder prätibialen

Läsionen z. B. alle ovalen, quadratischen

und länglichen Schaumverbände von Tegaderm Foam/Foam Adhesive entsprechend der Wundgröße und -form. Bei Gamaschenulcera: Tegaderm Foam

verbindende Stellen.



90600 51×51cm 90601 10,0 × 10,0 cm





90610 8,8 × 8,8 cm



90613 14.3 × 15.6 cm 19.0 × 22.2 cm



90611 10,0 × 11,0 cm



90602 10,0 × 20,0 cm

90605 10.0 × 60.0 cm Rolle

10,0 × 11,0 cm

14.3 × 15.6 cm

19,0 × 22,2 cm

90619 14,0 × 14,0 cm



90614 6.9 × 7.6 cm





90600 5,1 × 5,1 cm 90601 10,0 × 10,0 cm



90603 20.0 × 20.0 cm



90610 8.8 × 8.8 cm



90613 90612 14,3 × 14,3 cm



90615 6,9 × 6,9 cm

Zur Anwendung:

Zeh z. B. Tegaderm Foam Adhesive Kleeblatt-Form – optimal für schwierig

zu verbindende Stellen.

Wählen Sie die Verbände so, dass die Schaumauflage die intakte Haut um 2,5 cm überlappt!

Beobachten Sie die Wunde auf Infektionszeichen. Infizierte Wunden bedürfen einer ergänzenden Behandlung und häufigerer Verbandwechsel.

Die Tegaderm Schaumverbände können als saugfähiger Sekundärverband über Wundfüllern wie z. B. Alginaten eingesetzt werden.

Ein Verbandwechsel wird empfohlen, wenn das Exsudat sich am Verbandrand abzeichnet oder der Verband sich löst, spätestens jedoch nach 7 Tagen.



"Wie kann ich Tegaderm Foam und Tegaderm Foam Adhesive Schaumverbände beziehen?"

Bestellinformationen:

Tegaderm Foam

Bestell-Nr.	Abmessungen	Stück/ Packung	VE* in Packungen	PZN	Pharmacode	
90600	5,1 x 5,1 cm	10	4	2836010	3401604	
90601	10,0 x 10,0 cm	10	4	2836027	3401610	
90602	10,0 x 20,0 cm	5	6	2836056	3401627	
90603	20,0 x 20,0 cm	5	6	2836062	3401633	
90604	8,8 x 8,8 cm (geschlitzt mit Loch)	10	4	2836079	3401656	
90605	10,0 x 60,0 cm (gerollt)	1 Rolle/ Schachtel	6 Rollen/ Karton	2836033	3401656	

Tegaderm Foam Adhesive

	Bestell-Nr.	Abmessungen Schaumstoff- auflage	Abmessungen insgesamt	Stück/ Packung	VE* in Packungen	PZN	Pharmacode
	90610	5,0 x 5,0 cm	8,8 x 8,8 cm	10	4	2855585	3401691
	90611	6,0 x 7,6 cm	10,0 x 11,0 cm	10	4	2855591	3401722
	90612	10,0 x 10,0 cm	14,3 x 14,3 cm	10	4	2855616	3401797
	90613	10,0 x 11,0 cm	14,3 x 15,6 cm	5	6	2855622	3402012
	90614	3,1 x 3,8 cm	6,9 x 7,6 cm (Mini oval)	10	4	3379589	4486270
٧,	90615	2,5 x 2,5 cm	6,9 x 6,9 cm (Kleeblatt-Form)	10	4	3379572	4486264
	90616	14,0 x 17,1 cm	19,0 x 22,2 cm	5	3	2855645	3402029
	90619	7,6 x 7,6 cm	14,0 x 14,0 cm	5	4	2855651	3402035

Tegaderm Foam, Tegaderm Foam Adhesive und die dazugehörigen Packungen sind latexfrei. *Versandeinheit



Außerklinischer Vertrieb durch Fresenius Kabi Deutschland GmbH.



3M Medica Zweigniederlassung der 3M Deutschland GmbH

Hammfelddamm 11 41453 Neuss Telefon +49 (0) 21 31 14-0 Telefax +49 (0) 21 31 14 44 32 3mmedica.de@mmm.com www.3MMedica.de

3M Österreich GmbH Medizin

Kranichberggasse 4 1120 Wien Telefon +43 (0)86 686-0 Telefax +43 (0)86 686-330 medizin-at@mmm.com www.3M-medizin.at

3M (Schweiz) GmbH Medizin

Eggstrasse 93 8803 Rüschlikon Telefon +41 (0)44 724 92 31 Telefax +41 (0)44 724 92 38 medical.ch@mmm.com www.3m.com/ch/healthcare

Diese Broschüre bitte nach Gebrauch recyceln. 3M und Tegaderm sind eingetragene Warenzeichen der Firma 3M. © 3M 2016. All rights reserved.