

DAS VOLLE PROGRAMM FÜR DIE FLÄCHE IN NUR




Incidin® Pro

Flächendesinfektionsmittel für Medizinprodukte und Oberflächen aller Art

Incidin® Pro setzt mit seiner SMART-BALANCED-Formel einen neuen Standard für die Profi-Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.

- Ihr Pro für Schnelligkeit
- Ihr Pro für Effektivität
- Ihr Pro für Verträglichkeit

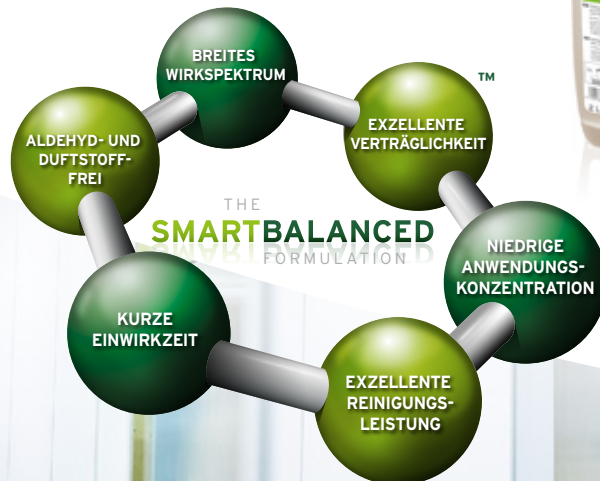

Incidin® Pro

Flächendesinfektionsmittel für
Medizinprodukte und Oberflächen aller Art

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Breites Wirkspektrum – nach den neuesten EN Standards getestet	Effektive Desinfektion und Reinigung
Kurze Einwirkzeiten bei niedrigen Anwendungskonzentrationen	Zeit- und Kostenersparnis
Exzellente Reinigungsleistung	Saubere Oberflächen mit hoher Materialkompatibilität
Exzellente Verträglichkeit	Verträglich mit Metallen, Linoleum, PVC, Keramik, Gummi und Kunststoff



Das volle Programm in nur 60 Minuten

- ▲ Wirksamkeit* gemäß 4-Felder-Test nach 30 Minuten bei 0,5 %
- ▲ Wirksamkeit* gegenüber Norovirus nach 60 Minuten bei 1 %
- ▲ Tuberkulozide Wirksamkeit* nach 60 Minuten bei 1,5 %
- ▲ Mykobakterizid Wirksamkeit* nach 60 Minuten bei 1,5 %

* Belastung getestet nach neusten EN-Normen und unter hoher Belastung

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION %	ml/L	EINWIRKZEIT Min.
VAH-Liste (bakterizid, levurozid)			
Flächendesinfektion gemäß DGHM 2001, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	0,5 / 1	5 / 10	30 / 15
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie			
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*	0,25 / 0,5	2,5 / 5	30 / 15
Norovirus (MNV)*	1,5	15	30
Rotavirus*	1 / 1,5	10 / 15	60 / 5
Adenovirus*	2	20	60
Papovavirus/Polyomavirus / SV40*	1,5	15	15
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)			
EN 13727 (bakterizid)	0,25	2,5	5
EN 13624 (levurozid)	0,25	2,5	5
EN 14348 (mykobakterizid)	1,5	15	60
EN 14476 (Norovirus, MNV)	1 / 1,5	10 / 15	60 / 30
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)			
EN 16615 (bakterizid)	0,5	5	30
EN 16615 (levurozid)	0,5	5	30
Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)			
Mykobakterizid, mit Mechanik	2 / 4	20 / 40	120 / 60

* DVV 2015 (Susp. Test)

EUROPEAN HEADQUARTERS: ECOLAB EUROPE GMBH

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44-877-2001
www.ecolab.eu



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



SCHNELL.
EFFEKTIV.
VERTRÄGLICH.



Oberflächendesinfektion
für Medizinprodukte



Flüssiges Desinfektionsmittel-
konzentrat zur Desinfektion
von Flächen aller Art.
D BIOZID N-54665

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gebrauchslösung durch Verdünnen mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität (max. 30 °C) in der gewünschten Konzentration ansetzen.

Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten. Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Amin- bzw. aminderivat-haltige Desinfektionsmittel und aldehydhaltige Desinfektionsmittel sind nicht im Wechsel anwendbar. Bei Umstellung ist eine gründliche Zwischenreinigung notwendig.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten:
10,0 g 2-Phenoxyethanol,
8,0 g N,N-bis-(3-Aminopropyl)dodecylamin,
7,5 g Benzalkoniumchlorid

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft – mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungs- einheit	Artikel- nummer
Incidin® Pro Dosierbeutel	400 x 20 ml	30 765 60 PZN 108 328 71
Incidin® Pro Dosierflasche	3 x 2 L	30 766 80 PZN 101 793 88
Incidin® Pro Kanister	6 L	30 767 60 PZN 101 793 71
Incidin® Pro Kanister	30 L	30 767 80

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern.

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

