



**Neue
Formel**

Gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion und
Reinigung von Flächen aller Art.

kodan® (N) wipes

Unser Plus

- kurze Einwirkzeiten
- umfangreich einsetzbar
- für den Toilettenbereich und Wickelauflagen geeignet
- dermatologisch getestet

Anwendungsgebiete

Die kodan® (N) wipes eignen sich für die umfangreiche Desinfektion von nicht-medizinischen Flächen.

Zum Beispiel:

- Türgriffe
- Arbeitsflächen
- Toilettenbereich
- Wickelauflagen

Anwendungshinweise

Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Die Fläche mit getränktem Tuch gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Achten Sie beim Öffnen und Einfädeln des ersten Tuches auf hygienische Aspekte. Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten. Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden. schülke garantiert nach Anbruch der Verpackung eine Haltbarkeit von 3 Monaten.

Folgende Größen sind erhältlich:

- kodan® (N) wipes: 10 Dosen pro Karton mit jeweils 90 Tüchern; Ø14 cm x 22 cm
- kodan® (N) wipes refill: 20 Refills pro Karton mit jeweils 90 Tüchern; Ø14 cm x 22 cm

Mikrobiologische Wirksamkeit

| Wirksamkeit | Konzentration | Einwirkzeit |
|---|-----------------|-------------|
| bakterizid gemäß VAH - hohe Belastung | gebrauchsfertig | 1 Min. |
| bakterizid EN13727, EN16615 - hohe Belastung | gebrauchsfertig | 1 Min. |
| tuberkulozid EN14348 - hohe Belastung | gebrauchsfertig | 1 Min. |
| levurozid EN16615 - hohe Belastung | gebrauchsfertig | 1 Min. |
| levurozid EN13624 - hohe Belastung | gebrauchsfertig | 1 Min. |
| levurozid gemäß VAH | gebrauchsfertig | 1 Min. |
| fungizid EN13624 - hohe Belastung | gebrauchsfertig | 2 Min. |
| begrenzt viruzid gemäß DVV-/RKI-Leitlinie | gebrauchsfertig | 30 Sek. |
| Norovirus EN14476 | gebrauchsfertig | 1 Min. |
| Rotavirus gemäß DVV | gebrauchsfertig | 30 Sek. |
| Adenovirus (Typ 5) gemäß DVV-/RKI-Leitlinie | gebrauchsfertig | 5 Min. |



kodan[®] (N) wipes

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 25 g

Ethanol (94% w/w), 35 g Propan-1-ol

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004:

Duftstoffe

Verwandte Produkte

- mikroqid[®] AF wipes
- mikroqid[®] sensitive wipes
- mikroqid[®] universal wipes premium

Chemisch-physikalische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Dichte | ca. 0,89 g/cm ³ / 20 °C / der Wirkstofflösung |
| Farbe | farblos |
| Flammpunkt | 27 °C / Methode : DIN 51755 Part 1 / der Wirkstofflösung |
| Form | Wässrig-alkoholische Lösung auf Vliesstoff |
| pH | ca. 7 / 20 °C / der Wirkstofflösung |
| Viskosität, dynamisch | Keine Daten verfügbar |

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das Produkt ist äußerst materialverträglich mit Metallen und Kunststoffen (außer Acrylglas und alkoholempfindlichen Lacken). Bitte beachten Sie den Brand- und Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR-Regel "Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst". Nur kleine Flächen behandeln. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberfläche ab. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich.

Wiederbefüllung der Dose

Zunächst die Hände desinfizieren und frische Schutzhandschuhe anziehen. Bitte während des Befüllungsvorgangs darauf achten, dass die Handschuhe nicht durch andere Tätigkeiten kontaminiert werden. Bei jeder Wiederbefüllung ist der Deckelverschluss aufzubereiten. Bei der Aufbereitung wird dieser mit einem alkoholischen Flächendesinfektionsmittel desinfizierend gereinigt. schülke garantiert nach Anbruch der Verpackung eine Haltbarkeit von 3 Monaten.

Bestellinformation

| Artikel | Lieferform | Art.-Nr. |
|---|------------|----------|
| kodan [®] (N) wipes refill (20 x 90 wipes) | 20/Karton | 70002035 |
| kodan [®] (N) wipes (10 x 90 wipes) | 10/Karton | 70002034 |

Anwendungshilfen

| Anwendungshilfen | Art.-Nr. |
|---------------------------------------|----------|
| Wandhalterung für Spenderdose (klein) | 134417 |



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

 **Air Liquide** HEALTHCARE Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.