

3M™ Cavilon™



Reizfreier Hautschutzfilm

- Schützt **intakte** und **geschädigte** Haut
- Indikation: Stomaversorgung, Wundrandbehandlung, Hautschutz
- **Hautschutz** mit nur 1 Substanz
- Alkoholfrei, steril, nicht zytotoxisch
- Hautschutz bis zu **72 Stunden!**
- Nur 1–2 Schichten Film auftragen!
- Fett und rückfettende Substanzen lösen den Schutzfilm auf
- Gute Grundlage für klebende Materialien (Pflaster, Verbände)

Langzeit-Hautschutz-Creme

- Schützt und pflegt **intakte** Haut (gerötet, gereizt)
- Indikation: **Prophylaxe** bei Inkontinenz, Hautschutz, Hautpflege
- **Hautschutz + Feuchtigkeitsspende**, hypoallergen, enthält Parfum und Dimethikon
- Hautschutz bis zu **24 Stunden!**
- Sehr wenig Creme auftragen!
- Schutzfilm bleibt in Verbindung mit Fett erhalten
- Gute Grundlage für klebende Materialien (Pflaster, Verbände)
- **Kann Klebkraft sogar erhöhen!**

Bestellinformationen

- Einzigartiger Schutz gegen Nässe und Reizstoffe
- Pflegt trockene Haut und spendet Feuchtigkeit
- Erhältlich als Tube oder als Sachet



3M™ Cavilon™ DBC Langzeit-Hautschutz-Creme

Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Inhalt/ Box	Pharmacode
3391	Creme, in Tube	28 g	12 Stück	2687403
3392	Creme, in Tube	92 g	12 Stück	2451586
3392S	Creme, in Sachet	2 g	20 Stück	2655449

3M Medizin

Haut schützen – Wundheilung unterstützen

3M™ Cavilon™ DBC Langzeit-Hautschutz-Creme



Professioneller Schutz vor Nässe & Reizstoffen

- Einzigartige Acrylat-Terpolymer-Barriere
- Lang anhaltender Schutz intakter Haut
- Klinisch geprüfte Qualität und Wirksamkeit



Der Schutz für Ihre Haut!

3M

3M (Schweiz) AG
Medizin
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon 044 724 92 31
Telefax 044 724 92 38
medical.ch@mmm.com
www.cavilon.ch


3M und Cavilon sind eingetragene
Warenzeichen der Firma 3M.
© 3M 2011. All rights reserved.

3M


Schutz intakter Haut

3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme

bietet einen einzigartigen, lang anhaltenden Schutz vor Körperflüssigkeiten und spendet der Haut gleichzeitig Feuchtigkeit.

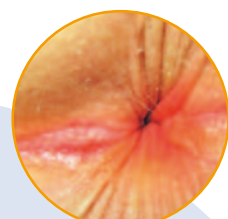

zur Linderung bei analem Juckreiz

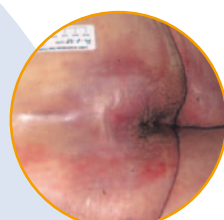

als Prophylaxe bei Inkontinenz oder akuter Diarrhö



als Prophylaxe gegen Windeldermatitis



als Prophylaxe gegen gereizte Haut, verursacht durch Kleber, Verbände oder Stomaplatten

Lang anhaltender Schutz gegen Nässe und Reizstoffe

- Hautschutz durch einzigartige Acrylat-Terpolymer-Barriere
- Atmungsaktiv und wasserfest
- Hypoallergen und pH-neutral
- Schützt die gesunde Haut vor Stuhlgang, Urin und anderen Körperflüssigkeiten

Pflegt ergiebig und sehr verträglich

- Spendet trockener Haut intensiv Feuchtigkeit
- Hohergiebig und lange wirksam – bis zu 24 Stunden
- Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und verzögert die Verdunstung von Wasser durch die Haut

Einfach und wirtschaftlich in der Anwendung


- Trocknet schnell und hinterlässt keinen Klebefilm
- Erhält die Klebkraft von Pflastern und Verbänden
- Erhält die Aufnahmefähigkeit von Inkontinenzhilfsmitteln, da sie die Poren nicht verstopft
- Zieht schnell in die Haut ein
- Beeinträchtigt nicht die Absorptionsleistungen von Windeln oder absorbierenden Verbänden

Wie funktioniert 3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme?

Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme bietet einen einzigartigen, lang anhaltenden Schutz vor Körperflüssigkeiten und spendet der Haut gleichzeitig Feuchtigkeit. Die enthaltenen Pflegesubstanzen sorgen zudem für eine weiche, glatte und geschmeidige Haut. Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme wird auf die saubere und trockene Haut aufgetragen und sanft einmassiert.

Die einzigartige, patentierte Acrylat-Terpolymer-Barriere ist bis zu 24 Stunden wirksam. Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme erhält die Aufnahmefähigkeit von Inkontinenzhilfsmitteln, da sie die Poren nicht verstopft. Auch die Klebkraft von Pflastern und Verbänden bleibt erhalten – sie lassen sich darüber problemlos fixieren.

Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme schützt zuverlässig gegen Nässe und Reizstoffe, pflegt trockene Haut und spendet Feuchtigkeit.

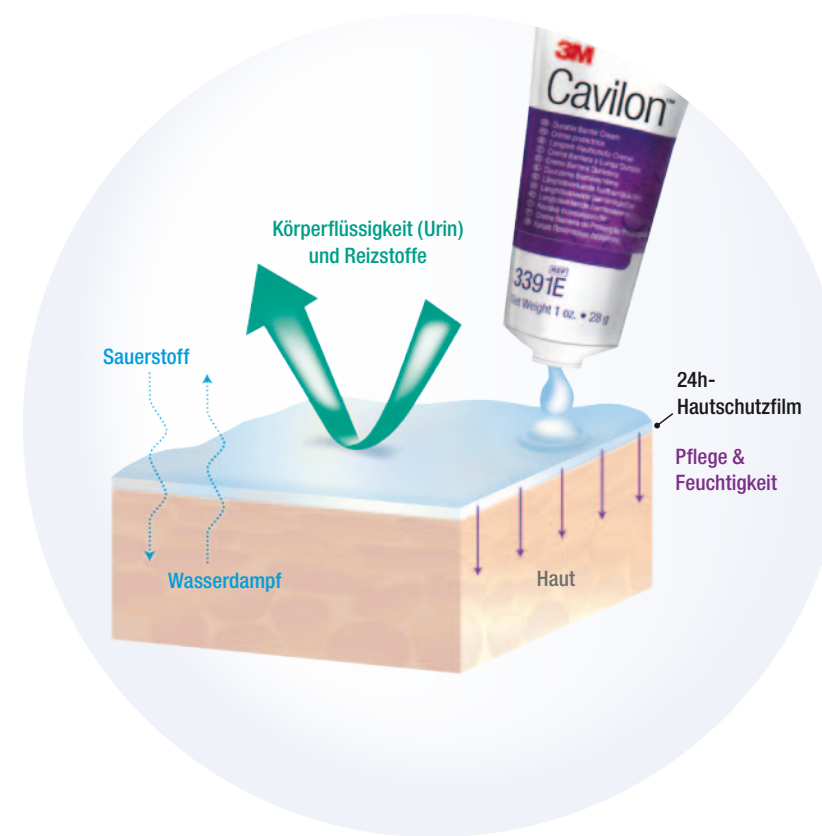

Anwendung

Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme ist besonders ergiebig. Daher genügt schon eine kleine Menge um die Haut zu schützen.

1. Tragen Sie die Creme auf saubere und trockene Haut auf und massieren sie diese sanft ein.
2. Die Creme sollte einmal täglich bzw. nach dreimaligem Waschen erneuert werden.

Sehr wichtig:

Sparsam auftragen. Wenn sich die Haut nach dem Auftragen „ölrig“ anfühlt, wurde zu viel aufgetragen.

Kontraindikationen

- Manifeste bakterielle oder mykotische Infektsituationen

3M™ Cavilon™ Indikationsgebiete



Kopf/Gesicht

- 3M™ Cavilon™ NSBF Reizfreier Hautschutzfilm
- Schützt vor Reibung (z. B. Ohren)
- Schützt die Haut vor Körperflüssigkeiten und Hautläsionen durch Klebstoffe
- Schützt vor Mazeration bei stetem Speichelfluss
- Schützt Mundwinkel vor Nahrungsrückständen, Speichel und Reibung
- Schützt den Wundrand bei Wunden im Gesicht

Brust

- 3M™ Cavilon™ NSBF Reizfreier Hautschutzfilm
- Schützt die Haut in Hautfalten vor Reibung und Feuchtigkeit

Leiste

- 3M™ Cavilon™ NSBF Reizfreier Hautschutzfilm
- Schützt in Hautfalten vor Intertrigo

Hände

- 3M™ Cavilon™ DBC Langzeit-Hautschutz-Creme
- Spendet trockener, gereizter Haut Feuchtigkeit

Unterschenkel

- 3M™ Cavilon™ NSBF Reizfreier Hautschutzfilm
- Schützt die Haut vor Reibung bei Trägern von Unterschenkelprothesen
- Schützt den Wundrand bei Ulcus cruris
- Kann die Haut unter dem Kompressionsverband vor Mazeration schützen
- 3M™ Cavilon™ DBC Langzeit-Hautschutz-Creme
- Befeuchtet trockene Haut an Unterschenkeln

Fussknöchel/Füsse

- 3M™ Cavilon™ NSBF Reizfreier Hautschutzfilm
- Schützt die Haut vor Reibung in Schuhen
- Schützt den Wundrand vor Mazeration bei stark exsudierenden Wunden
- Schützt den Wundrand bei Ulcus cruris

Nacken/Kehle

- 3M™ Cavilon™ NSBF Reizfreier Hautschutzfilm
- Schützt die Haut um das Tracheostoma
- Schützt die Haut vor Klebstoffen z. B. bei IV Verbänden

Bauch

- 3M™ Cavilon™ NSBF Reizfreier Hautschutzfilm
- Schützt den Wundrand vor Mazeration
- Schützt die Haut um das Stoma vor aggressiven Körperflüssigkeiten

Hüfte

- 3M™ Cavilon™ NSBF Reizfreier Hautschutzfilm
- Kann den Wundrand bei dehiszenten Wunden schützen

Po/Oberschenkel

- 3M™ Cavilon™ DBC Langzeit-Hautschutz-Creme
- Schützt intakte Haut vor Körperflüssigkeiten z. B. bei Inkontinenz
- 3M™ Cavilon™ NSBF Reizfreier Hautschutzfilm
- Schützt die Haut bei Reibung
- Schützt die Haut vor Stripping
- Schützt Kinderhaut vor Windeldermatitis

3M™ Cavilon™ NSBF Reizfreier Hautschutzfilm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Inhalt/Box
3343	Lolly	1 ml	25 Stück
3343P	Lolly	1 ml	5 Stück
3344	Wipe	1 ml	30 Stück
3345	Lolly	3 ml	25 Stück
3346	Spray	28 ml	12 Stück
3346P	Spray	28 ml	1 Stück

3M™ Cavilon™ DBC Langzeit-Hautschutz-Creme

Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Inhalt/Box
3391	Creme, in Tube	28 g	12 Stück
3392	Creme, in Tube	92 g	12 Stück
3392S	Creme, in Sachet	2 g	20 Stück