

DIE ALKOHOLISCHE SCHNELLEDESINFEKTION

Incidin® Liquid

Gebrauchsfertiges Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion

PRAXISNAH NACH
NEUER EN 16615
GETESTET

Breites Wirkspektrum gegen
Bakterien (inkl. TB) und Hefen.

Hohe Desinfektionsleistung auf
allen alkoholbeständigen Flächen,
selbst in Risikobereichen.

- ▶ Schnell
- ▶ Aldehydfrei
- ▶ Noroviruzid



Incidin® Liquid













Gebrauchsfertiges Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Gebrauchsfertige Spraylösung mit besonders kurzer Einwirkzeit und angenehmen Geruch	Schnelldesinfektion in Kombination mit starker und gezielter Anwendung, dabei angenehm im Gebrauch
Ausgewogene, synergetische Formulierung verschiedener Wirkstoffe, aldehydfrei	Gute Benetzung, schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung durch Alkohole, besonders anwenderfreundlich
Anwendung im Incidin® Dry Wipes System	Schnelle Anwendung am „Point of Care“ mit einer Standzeit von 28 Tagen und hochwertigen Tüchern in Premium-Qualität.

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT Min.
VAH-Liste (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)		
Flächendesinfektion gemäß DGHM 2001, mit und ohne Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	konzentriert	5
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*	konzentriert	0,5
Norovirus (MNV)*	konzentriert	10
Rotavirus*	konzentriert	0,5
Adenovirus*	konzentriert	1
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	konzentriert	10
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)		
EN 13727 (bakterizid)	konzentriert	1
EN 13624 (levurozid)	konzentriert	1
EN 14348 (tuberkulozid)	konzentriert	1
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)		
EN 16615 (bakterizid)	konzentriert	1
EN 16615 (levurozid)	konzentriert	1
Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)		
Bakterizid, levurozid, ohne Mechanik	konzentriert	1

* DVV 2015 (Susp. Test)

GEBRAUCHSANWEISUNG

			<ol style="list-style-type: none"> 1 Auf die Oberfläche sprühen 2 Mit einem Tuch über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist 3 Trocknen lassen
			<ol style="list-style-type: none"> 1 Auf einen sauberes Tuch sprühen 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist 3 Trocknen lassen
			<ol style="list-style-type: none"> 1 Auf die Oberfläche sprühen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist 2 Trocknen lassen
			<ol style="list-style-type: none"> 1 Tuch aus dem Tuchspender entnehmen 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist 3 Trocknen lassen

EUROPEAN HEADQUARTERS: ECOLAB EUROPE GMBH

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Schweiz
+41(0)44-877-2001
www.ecolab.eu



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0)2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



SCHNELL. ALDEHYDFREI. NOROVIRUZID.



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Alkoholische Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Flächen aller Art.
ⓓ BIOZID N-12496

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gebrauchsfertige Lösung zum Wischen oder Sprühen, sowie zur Verwendung im Tuchspender (Incidin® Dry Wipes System). Produkt auf trockenen Zellstoff geben, die Oberfläche abwischen und antrocknen lassen oder Oberfläche aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen (ca. 40 ml/m²) und antrocknen lassen. Getränktes Tuch aus Tuchspender (Incidin® Dry Wipes System) entnehmen und die Oberfläche abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten. Soweit elektrische Geräte betrieben werden, ist auf Explosionsschutz oder spannungsfreien Zustand der Geräte zu achten. Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten:
35 g 2-Propanol, 25 g 1-Propanol

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin® Liquid Flasche	12 x 650 ml	30 893 20 PZN 125 465 95
Incidin® Liquid Flasche	12 x 1 L	30 113 40 PZN 075 030 98
Incidin® Liquid Kanister	2 x 5 L	30 113 50 PZN 075 030 81
Incidin® Wipes Dispenser N Tuchspender	1 Stück im Karton	100 33 125 PZN 109 46 586
Incidin® Premium Wipes HygPack Deckel rot	6 Stück / Karton	100 32 690 PZN 109 46 511

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Haltbarkeit nach dem Öffnen:

Bis zum aufgedrucktem Verfalldatum

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.