

Dosiertabelle Sekusept® aktiv



100 g Pulver = 150 ml

1 Dosierlöffel = 20 g Pulver = 30 ml

1 Dosierbecher = 100 g Pulver = 150 ml

Liter Lösung	Konzentration der Anwendungslösung	
	1%	2%
2 Liter	30 ml	60 ml
4 Liter	60 ml	120 ml
8 Liter	120 ml	240 ml
10 Liter	150 ml	300 ml
20 Liter	300 ml	600 ml
30 Liter	450 ml	900 ml

Anwendungshinweise:

Wasser vorlegen. Dem Wasservolumen entsprechende Pulvermenge mit Dosierbecher/-löffel einstreuen.

Mehrmals kurz umrühren. Nach wenigen Minuten ist die Lösung einsatzbereit.

Die gebrauchsfertige Lösung ist mindestens arbeitstäglich und bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln.