

## Meliseptol® Wipes sensitive – Desinfektionstücher für alkoholempfindliche Flächen

### Eigenschaften

- weiche, gebrauchsfertige Tücher (15,2 x 20 cm) zur Schnell-desinfektion von Ultraschallköpfen und anderen alkoholempfindlichen Oberflächen
- getränkt mit Meliseptol® Foam pure
- sehr gute Materialverträglichkeit
- weiche, nicht fuselnde Vliesqualität, vermeidet ein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- schnell wirksam, auch gegen Polyomaviren
- dermatologisch getestet
- aldehyd- und aminfrei
- farbstofffrei und ohne Parfüm
- Tränkflüssigkeit DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

### Materialverträglichkeit

- geeignet für alle Ultraschallgeräte und -köpfe (z. B. Philips, Hitachi, ALOKA)
- Acrylglas
- Untersuchungsliegen und -stühle der Fa. Schmitz
- Latex und Gummi
- Silikon
- Makrolon
- Kartenterminals CCV Deutschland
- Dialog+ und andere Hämodialysemaschinen
- Perfusor® Space
- Infusomat® Space

Lieferform	REF	PZN
Spenderbox mit 60 Tüchern	19582	06810007
Nachfüllpackung mit 60 Tüchern	19530	06810013
Edelstahl-Wandhalterung für Meliseptol® Wipes sensitive	3908397	-

#### Physikalisch-chemische Daten

Aussehen: weiße Tücher  
Geruch: unauffällig  
Dichte: ca. 0,98 g/ml  
Flammpunkt: + 31 °C

Hinweis: Desinfektionsmittel sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

sanft zu Materialien



### Hinweise zur Anwendung und Dosierung

Flächen wischen, sodass sie vollständig mit der Wirkstofflösung benetzt sind. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden. Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden! Auffüllen der Spenderbox: Folienbeutel aufschneiden und in die Spenderbox einsetzen. Erstes Tuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen und in die Entnahmeöffnung des Deckels einfädeln. Deckel auf die Spenderbox aufschrauben.

### Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten (EZ)

Einsatzgebiet	EZ
Flächendesinfektion gemäß DGHM/VAH bakterizid/levurozid	1 Min.* (geringe Belastung)
	2 Min.* (hohe Belastung)
tuberkulozid	3 Min.
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	1 Min.
Rotaviren	1 Min.
aviäre Influenzaviren	15 Sek.
Polyomaviren	5 Min.
Noroviren**	5 Min.

\* Der kürzestmögliche Listungswert beim VAH beträgt 5 Min.

\*\* Surrogatvirus MNV

#### Meliseptol® Wipes sensitive – Auszug aus den Produktinformationen

60 Tücher sind mit 300 g Lösung Meliseptol® Foam pure getränkt. 100 g Lösung enthalten: Propan-1-ol 17 g, Didecylidimethylammoniumchlorid 0,23 g, nicht ionische Tenside. Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5 % nicht ionische Tenside. Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung: reizend. Gefahr erster Augenschäden. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Augen-/Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.