

EINFACH · SICHER · SPART ZEIT & KOSTEN

SPAREN SIE SICH DIE AUFBEREITUNG!

Incidin™ Premium Wipes HygPack

Einzigartige hygienische Lösung für eine einfache Flächen-desinfektion im Tuchspendersystem auch für Risikobereiche

Kombinierbar mit
Incidin™ OxyFoam S 5 Liter**SPORIZIDE** FLÄCHENDESINFEKTION
MIT EINER STANDZEIT VON 31 TAGENDIE VORTEILE DES
INCIDIN™ PREMIUM WIPES HYGPACK

- ▲ **Einfach** - Einsatz im bestehenden Incidin™ Wipes Dispenser N möglich
- ▲ **Sicher** - Anwendung auch in Risikobereichen
- ▲ **Spart Zeit und Kosten** - Keine Aufbereitung von Tuchspender und Deckel erforderlich

KOMBINIERBAR MIT DEM
INCIDIN™ WIPES DISPENSER N

Wiederverschließbarer Tuchspender für Ecolab Incidin Premium Wipes & Incidin Premium Wipes HygPack.

- ▲ Flexibel einsetzbar - für HygPack und Premium Wipes
- ▲ Absolut dicht - kein verschütten
- ▲ Einfache Anwendung - beim Ansetzen und Aufbereiten
- ▲ Transparenter Deckel zur Füllstandskontrolle
- ▲ Stabil und wiederverschließbar
- ▲ Standzeit: bis zu 31 Tage



Incidin™ Premium Wipes HygPack

Einzigartige hygienische Lösung für eine einfache Flächen-desinfektion im Tuchspendersystem auch für Risikobereiche.

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Einfach	Einsatz im bestehenden Incidin™ Wipes Dispenser N möglich
Sicher	Anwendung auch in Risikobereichen
Spart Zeit und Kosten	Keine Aufbereitung von Tuchspender und Deckel erforderlich

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungs-einheit	Artikel-nummer
Incidin™ Premium Wipes HygPack mit blauer Kappe	6 Stück / Karton	100 32 688 PZN 109 46 391
Incidin™ Premium Wipes HygPack mit grüner Kappe	6 Stück / Karton	100 32 689 PZN 109 46 304
Incidin™ Premium Wipes HygPack mit roter Kappe	6 Stück / Karton	100 32 690 PZN 109 46 511

KOMBINIERBAR MIT

Incidin™ Wipes Dispenser N Tuchspender	1 Stück im Karton	100 33 125 PZN 109 46 586
--	-------------------	------------------------------

BESTANDTEILE DES INCIDIN™ PREMIUM WIPES HYGPACK

Tuchrolle aus hochwertigem trockenem fussselfreiem Vliestuch

Speziell entwickelter Folienbeutel zur Vermeidung von Kontamination

Deckel mit farbiger Kappe - transparent für schnelle Füllstandskontrolle

Sicherheitsetikett - zur Kennzeichnung von Produkt und Befülldatum

Eine Gebrauchsanleitung und weitere Informationen finden Sie hier

ANWENDUNGSHINWEISE

- Handschuhe anziehen. Den Eimer vor der Wiederbefüllung auf sichtbare Verschmutzung hin überprüfen und ggf. säubern.
- Incidin™ Premium Wipes HygPack mit Handschuhen aus der Verpackung entnehmen. Der Folienbeutel befindet sich in der Mitte der Tuchrolle. Bitte diesen herausnehmen und alle Bestandteile (Deckel, Etikett und Folienbeutel) auf die Arbeitsfläche legen.
- Folienbeutel in den Eimer einsetzen und über den Rand legen.
- Rolle Incidin™ Premium Wipes HygPack hineinstellen und erstes Tuch herausziehen.

2,5 L Incidin™ Desinfektionslösung einfüllen: Incidin™ Pro, Incidin™ Plus, Incidin™ Extra N und Incidin™ Rapid in gewünschter Anwendungskonzentration befüllen.
- 2,5 L
- 2,5 L

Incidin™ OxyFoam S, Incidin™ Liquid und Incidin™ Foam unverdünnt befüllen.
- Erstes Tuch durch die Deckelöffnung führen und den Eimer mit dem Deckel verschliessen. Nach Einfüllen der Lösung 30 - 60 Min. warten, sodass alle Tücher optimal durchtränkt sind.
- Nach dem Befüllungsvorgang das neue Sicherheitsetikett entsprechend beschriften und aufkleben. Die getränkten Tücher können 28 Tage verwendet werden, Incidin™ OxyFoam S sogar 31 Tage.
- Nach Gebrauch Folienbeutel entnehmen, ggf. Flüssigkeit entsorgen, Beutel und Deckel verwerfen. Eine Aufbereitung des Incidin™ Wipes Dispensers N braucht bei der Verwendung des Incidin™ Premium Wipes HygPack nicht erfolgen.

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Schweizland
+41(0) 44-877-2000
www.ecolab.eu

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0) 61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch

