



Extra pflegende alkoholische Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion

spezielles
Hautpflege Plus

desmanol[®] pure

Unser Plus

- umfassendes Wirkspektrum gegen Bakterien, Pilze und lipophile Viren
- Norovirus-wirksam innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- Hautschutz und -pflege dank innovativem Wirkstoffkonzept (Dexpanthenol + Ethylhexylglycerin)
- farbstoff- und parfümfrei, daher besonders hautfreundlich
- dermatologisch getestet

Anwendungsgebiete

- Hygienische Händedesinfektion
- Chirurgische Händedesinfektion

Produkteigenschaften

- unser speziell entwickeltes hyclick[®] System: Flaschen mit fix integrierter Pumpe und passendem hyclick[®] Spender:
- Erstöffnungs- und Transportsicherung für mehr Sicherheit
 - "Non-Removal" Schraubverschluss verhindert die Wiederverwendung der Pumpe
 - optimaler Schutz vor Kontaminationen

Anwendungshinweise

desmanol[®] pure wird unverdünnt angewendet. Während der Einwirkzeit bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sollte die portionierte Gabe von desmanol[®] pure so erfolgen, dass die Hände während der gesamten Applikationszeit gut angefeuchtet bleiben. Wir bieten für unsere Händedesinfektionsmittel unterschiedliche Applikationshilfen zur einfachen Dosierung an. Fragen Sie Ihren Betreuer nach dem aktuellsten Folder oder besuchen Sie unsere Website auf www.schuelke.at

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid	gebrauchsfertig	15 Sek.
tuberkulozid	gebrauchsfertig	30 Sek.
mykobakterizid	gebrauchsfertig	30 Sek.
levurozid	gebrauchsfertig	15 Sek.
begrenzt viruzid	gebrauchsfertig	15 Sek.
Influenzavirus	gebrauchsfertig	15 Sek.
Vaccinia Virus	gebrauchsfertig	15 Sek.
begrenzt viruzid PLUS	gebrauchsfertig	2 Min.
Adenovirus	gebrauchsfertig	2 Min.
Norovirus	gebrauchsfertig	30 Sek.
Rotavirus	gebrauchsfertig	15 Sek.

Anwendungsgebiet	Konzentration	Einwirkzeit
Chirurgische Händedesinfektion EN12791	gebrauchsfertig	90 Sek.
Hygienische Händedesinfektion EN1500	gebrauchsfertig	30 Sek.

Listungen

- ÖGHMP-Zertifikat
- VAH-Zertifikat



Produktdaten

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten 75 g Propan-2-ol

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,85 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	ca. 20 °C / Methode : DIN EN ISO 13736
Form	flüssig
pH	Nicht anwendbar
Viskosität, dynamisch	ca. 3,6 mPa*s / Methode : ISO 3219

Besondere Hinweise

Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten Heizquellen bringen. Die Haltbarkeit im geöffneten Originalgebinde entspricht der Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde. Nach Anbruch beträgt die Haltbarkeit im SM2-Spender 12 Monate sowie im KH-Wandspender 6 Monate. Nicht über das Verfallsdatum hinaus anwenden!

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
desmanol pure 100 ml FL	30/Karton	125210
desmanol pure 500 ml FL	20/Karton	125211
desmanol pure INT hyclick 500 ml FL	20/Karton	70000817
desmanol pure 1 l FL	10/Karton	125212
desmanol pure EF 1 l FL	10/Karton	125213
desmanol pure hyclick INT 1 l FL	10/Karton	70001795
desmanol pure 5 l KA	1/Kanister	125215

Verwandte Produkte

- desderman[®] care
- desderman[®] pure
- desderman[®] pure gel

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat desmanol[®] pure vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.at

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

 **Air Liquide** Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.
HEALTHCARE

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com