

# Dosiertabelle gigasept® pearls

schülke 

Dosierbecher: 100 g Granulat  $\triangleq$  150 ml

1 gehäufte Dosierlöffel  $\triangleq$  40 g Granulat  $\triangleq$  60 ml

Liter Lösung	Konzentration der Gebrauchslösung	
	1 %	2 %
1 Liter	15 ml ( $\triangleq$ 10 g)	30 ml ( $\triangleq$ 20 g)
2 Liter	30 ml ( $\triangleq$ 20 g)	60 ml ( $\triangleq$ 40 g)
4 Liter	60 ml ( $\triangleq$ 40 g)	120 ml ( $\triangleq$ 80 g)
8 Liter	120 ml ( $\triangleq$ 80 g)	240 ml ( $\triangleq$ 160 g)
10 Liter	150 ml ( $\triangleq$ 100 g)	300 ml ( $\triangleq$ 200 g)
20 Liter	300 ml ( $\triangleq$ 200 g)	600 ml ( $\triangleq$ 400 g)
30 Liter	450 ml ( $\triangleq$ 300 g)	900 ml ( $\triangleq$ 600 g)

## Anwendungshinweise:

Wasser vorlegen. Dem Wasservolumen entsprechende Granulatmenge mit Dosierbecher/-löffel einstreuen. Während der ersten 15 Minuten mehrfach umrühren, im Anschluss an diese Aktivierungszeit ist die Gebrauchslösung einsatzbereit. Gemäß RKI Empfehlung Gebrauchslösung arbeitstäglich und bei deutlich sichtbarer Kontamination erneuern.